
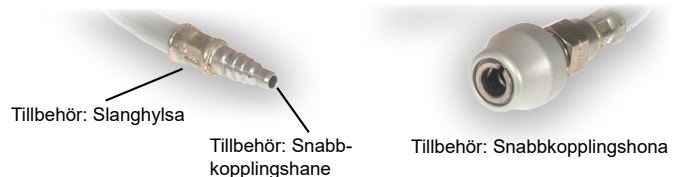


Medicinska slangar

Qmts medicinska slangar finns för samtliga medicinska gaser. Produkten tillverkas i material som är speciellt framtagna för medicinska gaser. Slangarna är färgmärkta och överensstämmer med gällande standard EN ISO 5359 samt nationell norm SIS HB 370.

Produkten levereras plastemballerad med pluggade ändar.

Produkten är CE-märkt.

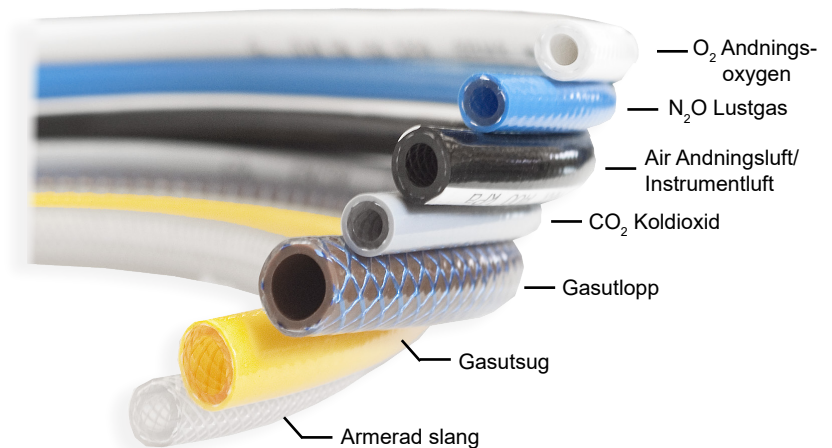

140509_230428.2

Programtext

QMT 7170 00X* Slang för medicinskt bruk. Produkten är CE-märkt och överensstämmer med gällande standard EN ISO 5359 samt nationell norm SIS HB 370.

* X ersätts med siffra för önskad gassort. Se avsnittet artikelnummer på nästa sida.

Konstruktion

Qmt medicinska slangar är konstruerade att utgöra en mobil gasledning av medicinska gaser. För fasta installationer rekommenderas Qmts högtrycksslangar utförda helt i rostfritt stål.

Max arbetstryck: 14 bar / 23°C.

Dimensioner och märkfärg

Gassort	Innerdiameter (mm)	Vägg tjocklek (mm)	Märkfärg
Andningsoxygen	6.00	2.50	Vit
Lustgas	6.00	2.50	Blå
Andningsluft/ Instrumentluft	8.00	3.00	Vit och svart
Koldioxid	6.00	2.50	Grå
Utlopp	12.00	2.70	Brun och blå
Utsug	10.00	3.00	Gul

Installationsanvisning

- Montera slangar enligt separat monteringsanvisning, i produktens Drift och Skötsel.
- Förpackningar eller skyddsemballage får ej avlägsnas förrän vid monteringsstillfället, då det kan finnas risk för att skada eller kontaminera produkten. Observera att produkten måste hållas fri från olja, fett och andra föroreningar.
- Slangnipplar (endast standardiserade slangnipplar får användas) som kläms på slang, skall klämmas på ett sådant sätt att hylsslängklämman inte kan återanvändas. Skruvslängklämmor eller dylikt får ej användas. Installatören skall vid montering märka slanghylsor med namn eller identifikationsnummer, för att säkerställa spårbarheten. Den färdiga slangen ska märkas med tillverkarens namn eller identifikationsnummer och ifall det är tillämpligt, för att ytterligare säkerställa spårbarheten ska den märkas med batchnummer, serienummer eller tillverkningsår.
- Installatören skall förvissa sig om att de inkluderade komponenterna är korrekta för den avsedda gasen och efter slangklämningen skall alla skarvar på slangen läckagesökas.

Se även avsnittet Varning nedan.

Drift & skötselanvisning

- Slangarna skall årligen säkerhetsprovats. Upptäcks inga sprickor, läckage eller att slangen förhårdnat, godkänns slangarna för ytterligare ett år.
- Vid läckage, sprickor eller förhårdnad, måste produkten bytas ut omgående.
- Olja, fett och andra föroreningar får ej komma i kontakt med produkten. Produkten skall förvaras rent även när den för tillfället inte används.
- Säkerhetsbesiktning sker enligt nationell norm SIS HB 370.
- Förbrukad produkt returneras eller lämnas till auktoriserad återvinningsfirma.
- Slangarna kan steriliseras, kontakta Qmt för vidare information.

Varning

- Vid egentillverkat slangmontage rekommenderar Qmt att den separata slangklämningsanvisningen följs, men det är mycket viktigt att tillverkaren ser till att slangmontaget och de ingående komponenterna följer gällande standarder. Vid egentillverkning måste provningar och riskanalys utföras på produkten. Ifall någon komponent byts ut på Qmts färdigtillverkade slang är det kundens ansvar att se till att slangmontaget, med de utbytta komponenterna, uppfyller kraven i EN ISO 5359. Qmt tar inte något ansvar för egentillverkat slangmontage i de fall kunden inte följt dessa anvisningar.
- Fabrikanten är skyldig att utföra tester på produkten som skall uppfylla de uppställda kraven i standarden.
- Slangarna får ej installeras som en fast del i gassystemet.
- Slangarna skall installeras på ett sådant sätt att de ej kan komma att klämmas, då risk för strypning av gasflödet föreligger.
- Pluggar och skyddsemballage får ej avlägsnas förrän vid monteringsstillfället, då risk för kontamination föreligger.

Artikelnummer

QMT 7170001	Slang Andningsoxygen (Vit)	För fler slangtyper, kontakta Qmt's säljorganisation
QMT 7170002	Slang Lustgas (Blå)	
QMT 7170003	Slang Andningsluft (Vit/Svart)	
QMT 7170004	Slang Instrumentluft (Vit/Svart)	
QMT 7170005	Slang Medicinsk koldioxid (Grå)	
QMT 7170006	Slang Utsug (Gul)	
QMT 7170007	Slang Utlopp (Blå/Brun)	Qmt säljer färdigtillverkade CE-märkta slangar och efter Ert önskemål med spårbarhet och datummärkning.
Tillbehör		
QMT 717204692	Slanghylsad dim 6	
QMT 717204693	Slanghylsa dim 8	
QMT 717204694	Slanghylsa dim 10	

För fler tillbehör, kontakta Qmt's säljare eller gå in på vår hemsida www.qmt3.com