



Byte O-ring gasuttag MK2

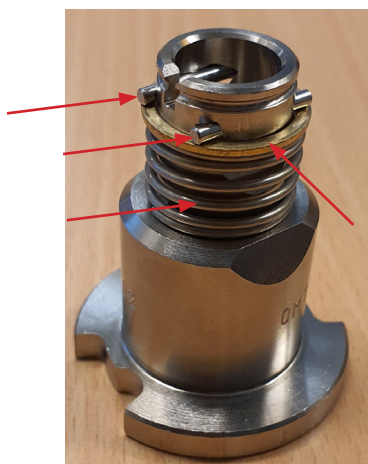

1 Lossa frigöringsplattan sedan skruva ut de 2 skruvarna som håller fast indexhuset.

2 Montera loss de 2 pinnarna, brickan och fjädern på indexhuset så det ser ut enligt höger bild.

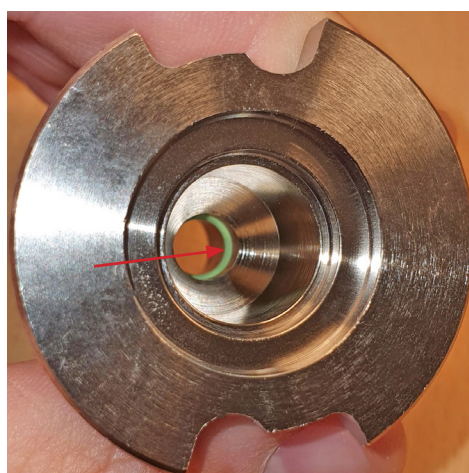

3 Pilla loss den gamla O-ringens med ett smalt verktyg. Tandläkarkrok eller liknande är lämplig i detta moment.



4 Ta fram en ny O-ring och verktyget.

Q400366



5 Montera O-ringen enligt bilden.



6 När O-ringen sitter i verktyget, sätt i indexhuset.



7 Med ett ordenligt tryck pressar man ner O-ringen. Kontrollera sedan att O-ringen hamnat rätt i spåret.

8 Montera tillbaka de 2 pinnarna, brickan och fjädern på indexhuset.
KLART

